

Ako začať

Príprava pred uvedením do prevádzky

Skontrolujte, či je súčasťou balenia všetko príslušenstvo.

- Návod na použitie
- Nabíjací kábel
- Plochý plastový nástroj

Poznámka k adaptéru: Odporúčame používať napájací adaptér (5 V/1 A). **Nepoužívajte rýchlejšie adaptéry/rýchlonabíjačky.** Môže to spôsobiť prechod zariadenia do režimu spánku ako ochranu batérie alebo poškodenie zariadenia. Nezabudnite, že "rýchle nabíjačky" poškodzujú batérie väčšiny zariadení a skracujú ich životnosť.

Kartu SIM pripravte podľa nasledujúcich pokynov.

- Karta SIM musí mať veľkosť NANO (pozri obrázok nižšie).



- **Kód PIN karty SIM musí byť deaktivovaný.** Kód PIN je možné deaktivovať vložením karty SIM do mobilného telefónu.
- Aby zariadenie správne fungovalo, musí byť na karte SIM aktivovaný internet a služby volania.

Poznámka: Priemerná spotreba dát zariadenia je približne 60-80 MB mesačne. Uistite sa, že karta SIM je plne kompatibilná so sieťou 4G LTE.

Upozornenie: Ak nie je aktívny žiadny dátový plán alebo na predplatenej karte nie je dostatok peňazí, **zariadenia sa pri opakovaných pokusoch o vytvorenie vhodného pripojenia rýchlo vyčerpajú.** Lokalizačné a komunikačné služby nie sú k dispozícii.

Zariadenie plne nabíte pomocou dodaného kábla USB zapojeného do napájacieho adaptéra. Ako je uvedené vyššie, na nabíjanie nepoužívajte rýchlonabíjačku ani port USB notebooku! Po chvíli sa obrazovka automaticky zapne a zobrazí sa indikátor nabíjania. **Pred prvým použitím zariadenia ho nabíjajte, kým sa úplne nenabije.** Úplné nabitie zariadenia spoznáte podľa toho, že oba indikátory budú svietiť súčasne a nebudú blikať.

Vloženie karty SIM do zariadenia

Pred vložení karta SIM do zariadenia sa uistite, že je vypnuté. Môžete ju vypnúť dlhým stlačením tlačidla SOS. Kartu SIM vložte v smere znázornenom na obrázku nižšie. Pomocou dodaného plochého nástroja zatlačte kartu SIM do zariadenia, kým nezacvakne na miesto.



Zapnutie zariadenia

Keď je zariadenie úplne nabité a karta SIM je vo vnútri, môžete zariadenie zapnúť dlhým stlačením tlačidla SOS. Načítanie signálu GSM alebo GPS trvá približne tri minúty. Je možné, že signál GPS sa vo vnútri budovy nenačíta. Pred prvým použitím odporúčame zariadenie vybrať.

Oboznámte sa so zariadením



Spárovanie s aplikáciou

Stiahnite si aplikáciu Beesure GPS

Úplné funkcie a všetky nastavenia zariadenia sú k dispozícii v aplikácii **Beesure GPS**. Na stiahnutie aplikácie použite nasledujúci QR kód alebo vyhľadajte **BeeSure** v Google Play (Android) alebo App Store (iPhone).



Zaregistrujte svoje zariadenie

Po nainštalovaní aplikácie budete vyzvaní na registráciu. Zadaťte svoj e-mail, overovací kód a vymyslite si heslo. Po registrácii začnite párovať svoje zariadenie. Naskenujte QR kód s registračným kódom alebo zadajte registračné číslo. Registračné číslo a QR kód nájdete na zadnej strane zariadenia alebo v aplikácii. Potom sa môžete prihlásiť späť do aplikácie a začať používať všetky jej funkcie.



Ťuknite na túto možnosť a naskenujte QR kód zo štítku s registračným kódom (je súčasťou balenia) alebo zadajte kód zobrazený pod QR kódom.



Poznámka: V prípade, že sa chcete zaregistrovať, môžete si vyžiadať registračný kód:


1. Naskenujte alebo ručne zadajte 15-miestny registračný kód (QR kód na zadnom kryte na zadnej strane zariadenia)
2. Vyplňte prezývku zariadenia (nosiča).
3. Vyberte svoju úlohu.
4. Môžete vyplniť telefónne číslo SIM karty v zariadení, ale ak ho ešte nepoznáte, nie je to potrebné. Telefónne číslo nie je potrebné vyplniť ani neskôr. Je to len informácia. Registračný kód je 15-miestny QR kód, nie čiarový kód IMEI.
5. Registračný kód zariadenia sa používa na zviazanie zariadenia.
6. Do aplikácie môžete pridať ďalšie zariadenia a prepínať medzi nimi, ak sa v budúcnosti rozhodnete zaobstarať si viac zariadení a mať ich všetky v jednej aplikácii.

Funkcie zariadenia

Všetky nastavenia sú k dispozícii v aplikácii Beesure GPS alebo tiež priamo v menu zariadenia.

Menu aplikácie

Všetky nižšie uvedené a ďalšie nastavenia môžete vybrať v aplikácii Beesure GPS.

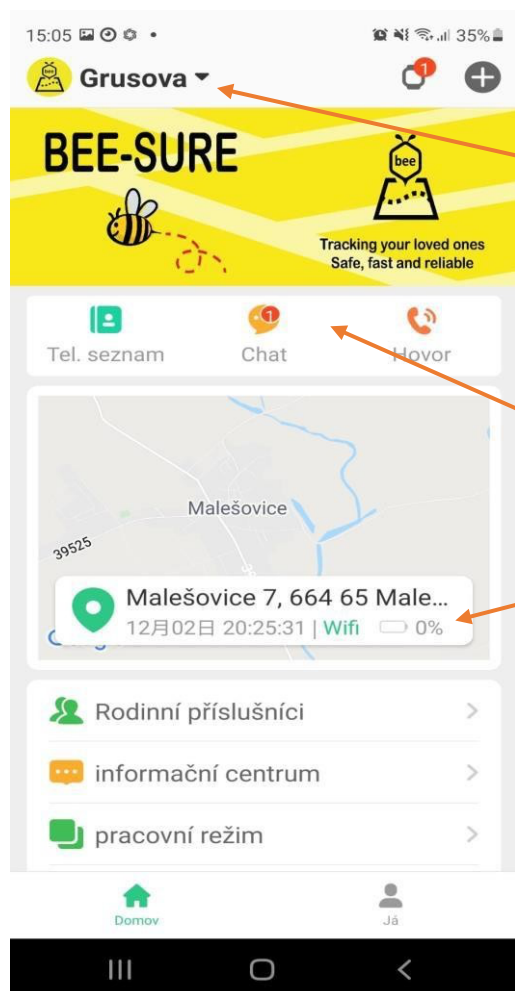

Ak používate viac ako jedno zariadenie, kliknite na názov zariadenia a vyberte si zo zoznamu zariadení.

Rýchly prístup k vašim kontaktom, hlasovým a textovým správam a priame vytáčanie vášho zariadenia.

Jednoduchá kontrola najnovšej aktualizácie polohy sledovaného zariadenia na domovskej obrazovke.

Služby určovania polohy

Pri prvom použití zariadenia odporúčame otestovať zariadenie vonku, aby ste sa uistili, že sa správne synchronizuje s polohou GPS zo satelitov a aby ste získali správne miestne súradnice v systéme Beesure GPS. Sledovanie zariadenia bude presnejšie, keď ho neskôr prenesiete späť do interiéru.

Ak v systéme Beesure GPS ovládáte viacero zariadení (maximálne 50 zariadení na jeden účet), musíte sa odhlásiť a znova prihlásiť. Všetky nastavenia sa automaticky aktualizujú tak, aby odrážali možnosti každého zariadenia.


Vaše zariadenie môže sledovať vašu polohu v troch režimoch:

- Normálny režim (raz za desať minút)
- Ekonomický režim (raz za hodinu)
- Režim sledovania (raz za minútu)

Vybraný režim ovplyvňuje spotrebu batérie. Na získanie základného prehľadu o polohe vašej blízkej osoby odporúčame používať dlhšie frekvencie aktualizácie, aby zariadenie vydržalo dlhšie bez nabíjania. V úspornom režime je životnosť batérie zariadenia približne dva až tri dni a v normálnom režime približne jeden deň.

Kliknutím na mapu na hlavnej obrazovke aplikácie Beesure GPS zobrazíte polohu svojho zariadenia. Môžete skontrolovať, kedy bola táto poloha naposledy aktualizovaná a aký typ lokalizačnej služby bol použitý (GPS, WiFi alebo LBS).

Stlačením tlačidla manuálneho určenia polohy (zelená značka, ako je vidieť na snímke obrazovky nižšie) môžete manuálne obnoviť svoju polohu v reálnom čase. Najprv sa zobrazí rýchla aktualizácia GPS a po necelej minúte sa zobrazí presnejšia poloha GPS, ak je k dispozícii. Ak vaše zariadenie neprijíma signál GPS, zobrazí sa len poloha LBS.

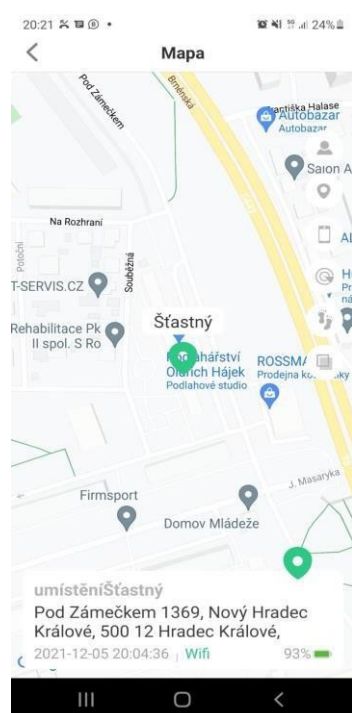


Zoznam zariadení
Poloha vybraného zariadenia
Moja poloha (poloha telefónu s aplikáciou)
Nastavenia bezpečnostnej zóny
História sledovania
zariadenia Zmena typu
mapy

Ručná aktualizácia polohy

Podrobné informácie o stave zariadenia (adresa polohy, posledný čas poloha, stav batérie)

Typy služieb určovania polohy, ktoré zariadenie používa

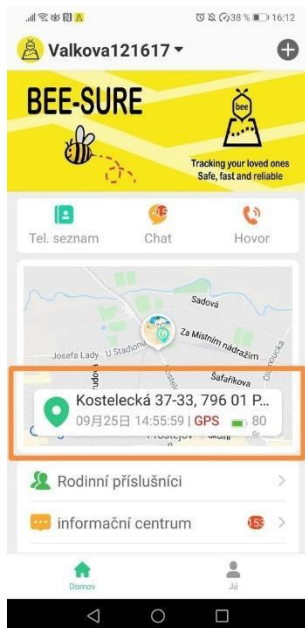

Toto zariadenie používa GPS, Wi-Fi alebo LBS (GSM lokalizácia sieť) pre služby určovania polohy.

- **GPS** určuje polohu s presnosťou do piatich metrov. Presnosť závisí od signálu GPS, ktorý môže byť oslabený v prostredí s vysokými stromami alebo budovami. Signál GPS zvyčajne nie je dostupný, keď je zariadenie v interiéri.
- **Lokalizácia Wi-Fi** využíva na určenie polohy blízke siete Wi-Fi, ktoré sú založené na polohe uvedenej v zozname verejných sietí Wi-Fi.
- **LBS** využíva sieť GSM a závisí od hustoty signálnych veží mobilného operátora vo vašej lokalite. Zvyčajne je veľmi nepresná a v niektorých oblastiach sa poloha zobrazená aplikáciou Beesure GPS môže líšiť o 200 až 500 metrov.

Prečítajte si dôležité informácie o používaní lokalizačných služieb uvedené nižšie:

- Ak chcete vidieť len presnú polohu svojho zariadenia, môžete používanie LBS v aplikácii Beesure GPS vypnúť. Upozorňujeme, že zariadenia budú používať iba GPS, ktoré nie je dostupné vo vnútri. To znamená, že zariadenia budú sledovať len zmeny polohy vo vonkajšom prostredí.
- Ak sa zariadenie prestane pohybovať alebo sa trasie, služba určovania polohy automaticky aktivuje pohotovostný režim, aby sa šetrila batéria. Zariadenie bude automaticky aktualizovať svoju polohu len vtedy, keď budete mať zariadenie na ruke a budete sa pohybovať.
- Ak nosíte zariadenie na ruke a pohybujete sa s ním, je pravdepodobné, že aj v interiéri budete môcť zachytiť svoju presnú polohu aspoň prostredníctvom siete Wi-Fi, ak nebude k dispozícii signál GPS.
- Poloha pomocou siete Wi-Fi závisí od údajov poskytnutých správcou siete Wi-Fi. Môže byť nepresná, ak správca siete Wi-Fi nezobrazuje správne informácie o polohe Wi-Fi. Túto funkciu nemôže zariadenie ovplyvniť.


Ak sa poloha používateľa zdá byť dlhší čas podozrivá, zavolajte zariadenie a overte, či je všetko v poriadku.

Bezpečnostné funkcie

SOS volanie

V aplikácii Beesure GPS môžete nastaviť až tri rôzne čísla SOS. Po dlhom stlačení tlačidla SOS zariadenie automaticky vytočí čísla vo vami zvolenom poradí. Ak telefón nikto nezdvihne, zariadenie to skúsi znova po 30 až 40 sekundách. Týmto spôsobom možno každé číslo vytočiť až dvakrát. Môžete tiež nastaviť upozornenie SMS (pozri nižšie) s informáciami o SOS volaní.

Poznámka: Keď je batéria zariadenia takmer vybitá, všetky funkcie sú deaktivované a dotykové tlačidlo nefunguje, aby sa ušetrila zostávajúca kapacita batérie pre SOS hovory.

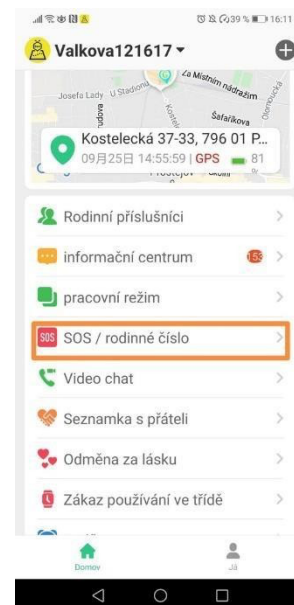


Upozornenia SMS


Keď sa uskutoční SOS volanie, zariadenie automaticky odošle na zvolené telefónne číslo SMS správu s informáciami o svojej polohe a čase SOS volania. Môžete tiež nastaviť upozornenie na SMS správu, keď je batéria takmer vybitá (pod 20 %).

Telefónny zoznam

Prostredníctvom aplikácie môžete v zariadení nastaviť t e l e f ó n n y z o z n a m . **A pozor!** Ten môže mať ešte jedno veľmi užitočné využitie. Môže slúžiť ako zoznam telefónnych čísel, ktoré s ú jediné, na ktoré sa možno dovolať do zariadenia. To znamená, že do zariadenia nebude volať nikto z call centier, s marketingovými ponukami atď.

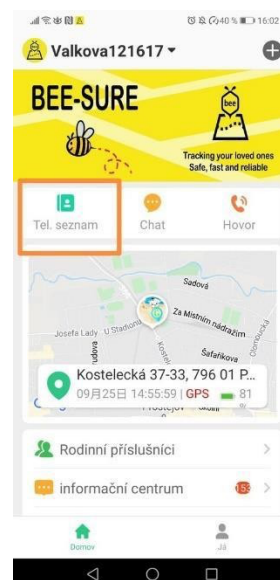

Odmietnutie neznámych hovorov

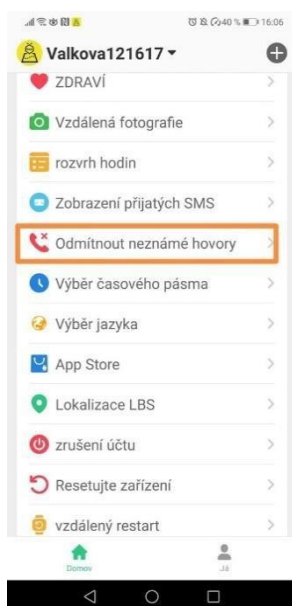


Na ochranu používateľov zariadenia pred podvodníkmi a nevyžiadanými hovormi môžete nastaviť odmietanie neznámych hovorov. Ak na vaše zariadenie zavolá neznáme číslo (to znamená, že nie je uložené v zozname kontaktov zariadenia), v aplikácii Beesure GPS sa zobrazí oznámenie.

Môžete tiež použiť funkciu "Retrieve SMS from device" (Získať SMS zo zariadenia) na čítanie SMS prijatých na vašom zariadení v aplikácii Beesure GPS. Je to užitočné na prijímanie overovacích kódov alebo iných dôležitých SMS správ.

Odpočúvanie

Ak osoba so zariadením neodpovedá na váš hovor, môžete použiť aplikáciu na odpočúvanie. Táto osoba aktívne neprijíma hovor/nepočúva a v skutočnosti o ňom nevie a vy môžete odpočúvať svoje okolie. Ak teda máte podozrenie, že sa niečo stalo, môžete pomocou tejto funkcie zistiť možný stav osoby, ktorá v danom okamihu nemôže prijať hovor.

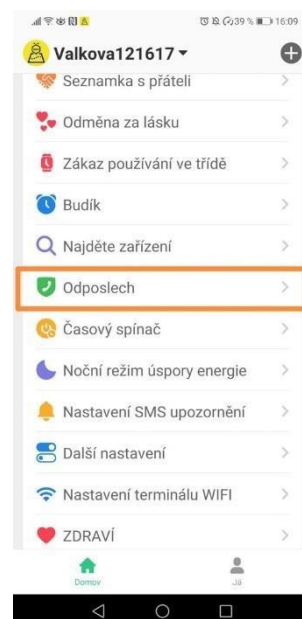

Bezpečnostná zóna

Na mape môžete nastaviť bezpečnostné zóny. Zariadenie vás automaticky upozorní, keď používateľ opustí zvolenú bezpečnostnú zónu.

- Otvorte položku "Bezpečnostná zóna" na mape.
- Kliknite na "+" v spodnej časti obrazovky.
- Nájdite na mape miesto, kde chcete nastaviť bezpečnostnú zónu, a kliknite naň.
- Zadať názov zóny a nastavte polomer, potom kliknite na tlačidlo "OK".

Poznámka: Beesure GPS umožňuje pre každé zariadenie tri bezpečnostné zóny. Uistite sa, že bezpečnostné zóny navzájom neprekrývajú.

Zakázanie funkcií

Ak nechcete, aby používateľ zariadenia volal na iné čísla ako tie, ktoré sú uložené v zozname kontaktov, môžete zakázať prístup k číselníku. Môžete tiež na diaľku vypnúť GPS, aby ste šetrili energiu batérie. Zariadenie bude používať iba polohu siete Wi-Fi alebo nepresnú polohu mobilnej siete.

Zdravie

Na karte "Zdravie" aplikácie Beesure GPS môžete na diaľku skontrolovať zdravotný stav používateľa zariadenia. Môžete si pozrieť informácie o fyzickej aktivite v reálnom čase (kroky, spaľené kalórie a prejdená vzdialenosť). Upozorňujeme, že toto zariadenie nenahrádza lekárske zariadenie a všetky merania majú len informatívny charakter.

V tejto časti aplikácie nájdete napr:


- krokmer, srdcový tep, krvný tlak, telesnú teplotu.
- množstvo cvičenia, vzdialenosť, spánok

Upozorňujeme, že funkciu "Kroky" je potrebné najprv aktivovať v aplikácii Beesure GPS (kliknite na "Zdravie" → "Kroky" → "Prepnúť"). Bez aktivácie tejto funkcie nebudete mať prístup k počtu krokov v aplikácii ani v zariadení. Pre aktuálne meranie kalórií alebo vzdialenosti nastavte v ponuke "Steps" aj ďalšie informácie vrátane hmotnosti a priemernej dĺžky kroku.

Tepovú frekvenciu/krvný tlak môžete merať na diaľku v reálnom čase kliknutím na ikonu merania (pozri fotografiu vpravo), môžete tiež 3-krát krátko stlačiť tlačidlo napájania a merať tepovú frekvenciu/krvný tlak/SPO2 z náramku, údaje sa zodpovedajúcim spôsobom zobrazia v aplikácii.

Upozornenie na pád

Zariadenie automaticky rozpozná pohyby, ktoré vyzerajú, že používateľ zariadenia spadol. Spolu so zvukovým upozornením sa zariadenie spýta, či používateľ spadol alebo nie. Ak používateľ neodpovie do piatich sekúnd, zariadenie automaticky spustí SOS volanie a odošle upozornenie do aplikácie Beesure GPS. V aplikácii môžete nastaviť, aké typy upozornení chcete dostávať. V aplikácii môžete nastaviť aj citlivosť detekcie pádu.

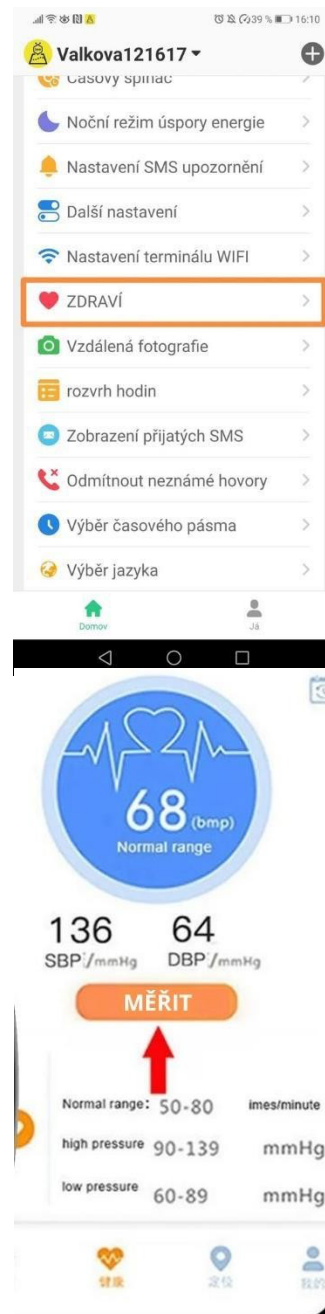

Pripomienky liekov

Môžete nastaviť pripomenutia s textovým štítkom a hlasovou poznámkou. Zariadenie automaticky prehrá hlasovú poznámku, ktorá používateľovi pripomenie, aby si v nastavenom čase vzal lieky (alebo môžete používateľovi zariadenia pripomenúť akúkoľvek inú činnosť). Pripomienku možno nastaviť tak, aby sa spustila raz alebo opakovane.

Vyhľadanie zariadenia

Keď zariadenie nie je nablízku, kliknite na tlačidlo **Nájsť zariadenie** v aplikácii a zariadenie bude zvonieť 1 minútu. Zvonenie zastavíte stlačením ľubovoľného tlačidla.

Ďalšie funkcie

Nočné šetrenie energie

Ak viete, že používateľ nemá zariadenie na sebe, keď spí, môžete nastaviť automatické šetrenie energie na nočný čas.

Nastavenia Wi-Fi

Ak chcete šetriť batériu a spotrebu údajov, môžete manuálne nastaviť pripojenie Wi-Fi pre siete, v ktorých používateľ zariadenia často trávi čas, rovnakým spôsobom ako v smartfóne. Toto zariadenie tiež automaticky používa všetky siete Wi-Fi na určenie svojej polohy (používa všetky dostupné siete Wi-Fi, nielen tie, ktoré ste nastavili v "Nastaveniach sledovania Wi-Fi").

Popis svetelných indikátorov

	Farba	Stav	Význam
Zariadenie zapnuté	Červená (Sieť)	Pomaly bliká	Vyhľadávanie signálu
		Rýchle blikanie	Prijatý signál
	Modrá (GPS)	Pomalé blikanie	Zisťovanie polohy
		Rýchle blikanie	Poloha nájdená
Nabíjanie	Červená svetlo	Zapnuté	Nabíjanie
	Modrá Svetlo	Na	Plne nabité
Vybitá batéria: pomaly bliká len červená kontrolka			

Často kladené otázky - Často kladené otázky

Spotreba batérie zariadenia je príliš vysoká. Ako môžem predĺžiť životnosť zariadenia?

Spotreba batérie sa zvyčajne určuje podľa lokalizačných služieb. Ak sa batéria zariadenia vybíja skôr, ako by ste chceli, vyskúšajte dlhšiu frekvenciu aktualizácie polohy. Dlhšie intervaly sa odporúčajú na šetrenie batérie, pretože svoju polohu môžete vždy manuálne skontrolovať v aplikácii Beesure GPS a ostatné služby fungujú bez obmedzení (napríklad bezpečnostné zóny atď.). Používanie Wi-Fi namiesto mobilných dát počas používania zariadenia tiež znižuje spotrebu batérie. Nastavte pripojenie Wi-Fi v aplikácii Beesure GPS alebo priamo v ponuke zariadenia.

Zariadenie je v aplikácii Beesure GPS v režime offline.

Chýbajúce spojenie medzi zariadením a aplikáciou Beesure GPS môže byť spôsobené rôznymi problémami. Skontrolujte, či vaše zariadenie spĺňa nasledujúce kritériá:

- Batéria zariadenia je nabitá.
- PIN kód SIM karty je deaktivovaný.
- SIM karta má aktívny dátový paušál alebo dostatok peňazí na priebežné dáta.

Lokalizačné služby sú veľmi nepresné.

Presnosť lokalizačných služieb vášho zariadenia závisí od aktuálne používanej metódy. Je určená nasledujúcimi faktormi.

Keď sa nachádzate vonku, zariadenie používa predovšetkým systém GPS, ktorý je ovplyvnený okolitým prostredím. Systém GPS má slabší signál v blízkosti vysokých budov, stromov atď. Ak systém GPS nie je k dispozícii alebo ešte nie je načítaný, zariadenie použije LBS na určenie polohy z mobilnej siete. To závisí od hustoty siete signalizačných veží. Lokalizáciu LBS môžete vypnúť v aplikácii Beesure GPS, aby ste zachovali len presnejšiu lokalizáciu GPS.

Systém GPS nie je k dispozícii vo vnútorných priestoroch. Zariadenie používa predovšetkým lokalizáciu LBS, ktorá je veľmi nepresná. Poloha sa môže aktualizovať, keď sa zariadenie pripojí k blízkej sieti Wi-Fi. Ak chcete presnejšiu službu určovania polohy, vypnite lokalizáciu LBS v aplikácii Beesure GPS. Zariadenie zobrazí polohu WiFi a ak WiFi nie je k dispozícii, zobrazí poslednú aktualizáciu vonkajšej polohy GPS.