

# ARKY



## *Manuál*

*ARKY vonkajšia skrinka s vyhrievaním (24V)*

## OBSAH

Použitie ARKY vonkajšej skrinky	4
Súčasti	5
Inštalácia skrinky	6
Alarm	7
Elektrické zapojenie	8
Špecifikácie	10
Prehlásenie o zhode	11

### DÔLEŽITÉ

Pozorne si prečítajte návod pred inštaláciou a použitím skrinky. Z bezpečnostných dôvodov by mala byť inštalácia vonkajšej skrinky do elektrickej siete vykonaná certifikovaným elektrikárom. Skrinka ARKY je navrhnutá na vonkajšie uskladnenie AED.

AED by nemal byť vystavený vlhkosti ani mrazu. Ak sa jeho batérie ochladia pod 0° C, stratia svoju kapacitu. Elektronika a kovové súčasti defibrilátora by sa mali udržiavať v suchu, aby sa zabezpečila jeho správna funkcia. Preto je vonkajšia skrinka ARKY AED vybavená nepremokavým neoprénovým tesnením a dvoma vyhrievacími telesami s termostatom.



- 1 Magnet alarmu
- 2 Háčik elastickej pásky pre zabezpečenie AED
- 3 Skrutka
- 4 Kryt skrutky
- 5 Očko visacého zámku
- 6 Termostat

## INŠTALÁCIA SKRINKY

Neinštalujte skrinku na miesto, kde bude vystavená priamemu slnečnému žiareniu a dažďu. Skrinku pripevnite pomocou priložených skrutiek. Skrutky sú vybavené neoprénovými podložkami zabezpečujúcimi vodotesnosť.

### DÔLEŽITÉ

Adaptér a káble nie sú vodotesné, preto by sa mali skladovať na suchom mieste chráneným pred mrazom.

## ALARM

Alarm je vybavený vypínačom. Ak chcete aktivovať zvukovú signalizáciu, zapnite čierny vypínač. Pre deaktiváciu vypnite vypínač. Alarm napájajú tri gombíkové batérie. Pre ich výmenu potiahnite horný kryt zariadenia nadol, ako znázorňuje šípka.



## ELEKTRICKÉ ZAPOJENIE

Skrinka je dodávaná s dvoma 45 W vykurovacími telesami. Termostat v skrínke reguluje teplotu tak, aby nedošlo k jej zamrznutiu. Z bezpečnostných dôvodov by mala byť inštalácia skrínky do elektrickej siete vykonaná certifikovaným elektrikárom. Je dôležité, aby bola skrínka pripojená k elektrickej rozvodnej sieti pomocou ochranného ističa.



Priložená káblová priechodka je vhodná pre dvojžilové káble s vonkajším priemerom 10 mm. Skontrolujte, či je káblová priechodka dostatočne utiahnutá.



Pripojte kábel skrínky a adaptéra pomocou zmršťovacej bužírky.

## ŠPECIFIKÁCIE

### Skrinka

Váha: 3,6 kg

Vonkajšie rozmery: 34 x 40 x 20 cm

Vnútorne rozmery: 28 x 32 x 18 cm

### Napájanie

Výhrevné telesá: 2x 45W

Vstup: AC 100-240 V ~1,5 A 50 ~ 60 Hz

Výstup: DC 24V, 3A

### Alarm

Batérie: 3 gombíkové batérie LR44



### Prehlásenie o zhode

Výrobca: Defibrion bv  
Verlengde Bremenweg 12  
9723 JV Groningen

Produkt: AED vonkajšia skrinka

Tento výrobok bol vyvinutý a vyrobený v súlade s nasledujúcimi normami a predpismi:

EN 60950-22 version 2006

en/a



Groningen, 01.05.2012

